

RECOVER
FASTER
BETTER

(Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid)

12mg/1.2ml STABHA™



Fanning Technique Injection


dilakukan dalam 1x suntikan



Fase I



Fase II

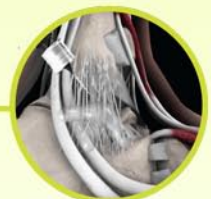

Fase III

1/3 bagian **SportVis** diinjeksikan untuk setiap fase injeksi.

- Dianjurkan untuk memberikan **SportVis** dalam waktu 48 Jam setelah cedera
- Injeksi kedua diberikan 48 - 72 Jam setelah injeksi pertama
- Hasil yang lebih optimal bila diberikan bersama dengan metode R.I.C.E.

FASTER & BETTER RECOVERY



SportVis™

12mg/1.2ml of STABHA

Pertama dan satu-satunya produk yang dipatenkan untuk indikasi ankle sprain dan epicondylitis grade I dan II.

SportVis mampu memperbaiki kualitas hidup pasien karena :

- **Mengoptimalkan dan mempercepat proses pemulihan sehingga dapat mengurangi resiko kambuh kembali.**
- **Memperbesar dan mempercepat Range of Movement (ROM) sehingga pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal.**
- **Mengurangi jumlah hari absen dari pekerjaan atau olahraga.**
- **Mengurangi efek samping dari penggunaan obat NSAID.**

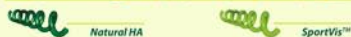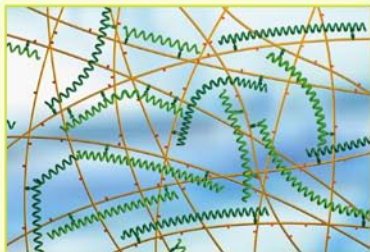

SportVis fibrin complex

"HA specifically binds to fibrin... increase and stabilize the volume and physical structure of the fibrin gel. HA can hydrate a large amount of water and readily form a porous viscoelastic gel." *Weigel et al**



*Artist impression
* As suggested in HA published literature*

Sportvis™-fibrin complex berfungsi sebagai:

- **Struktur pendukung pada tempat cedera**
- **Meningkatkan kualitas perbaikan jaringan lunak**
- **Meningkatkan laju penyembuhan**
- **Mengatur migrasi sel sehingga mengurangi rasa nyeri dan inflamasi**



Under license from :

 **MDT Int'l s.a.**
Geneva - Switzerland
www.mdtint.com

Marketed by :

 **Axelia Healthcare**
A Division of PT. Pro-Health International;